

# VAGINÁLNY TRENAŽÉR PERIFIT KEGEL EXERCISER WITH APP



## Návod

### OVLÁDANIE

- 1) Krátkym stlačením tlačidla napájania na základni zapnete a vypnete zariadenie PERIFIT. Po zapnutí bude blikať zelená LED dióda.
- 2) Potom spustíte mobilnú aplikáciu a postupujte podľa jej pokynov. Stiahnite si aplikáciu s názvom PERIFIT zo služby Google Play alebo App Store (aplikácia je len v angličtine, ale je celkom intuitívna).
- 3) Po nainštalovaní je potrebné vytvoriť registráciu, ktorá je jednoduchá a bezplatná.
- 4) Potom sa sama prepojí s vaším gadgetom a je to hotové.

### ÚDRŽBA

Po každom použití trenážér opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Trenažér je **videodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Na trenažér môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!** **Vodotesnosť** znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky. Vzhľadom iba k **videodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJANIE

Trenažér je napájaný vysokokvalitnou integrovanou jednorazovou batériou, na ktorú výrobca uvádza až 10 rokov používania a poskytuje 5 rokov záruky!

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

V balení nájdete PERIFIT KEGEL EXERCISER WITH APP.