

Jes extender

Rýchly sprievodca Jes-Extender Light - Jes-Extender Original - Jes-Extender Titanium - Jes-Extender Silver - Jes-Extender Gold

1. Začíname!

Pred upevnením plastového nosiča sa uistite, že na oboch stranách skrutky je priestor 1mm, ako smerom k šesťhranu, tak k základnému plastovému prstencu. To umožňuje skrutky rozširovať na obe strany.

2. Aká je Vaša osobná dĺžka?

Po nájdení vhodných predlžovacích tyčínok, ktoré vyhovujú vašej dĺžke, by celková dĺžka zariadenia mala byť o niečo dlhšia, než váš penis v pokojnom, ale celkom natiahnutom stave. V prípade potreby pridajte vhodné množstvo tyčínok.

3. Pripojte plastový nosič!

Teraz pripevnite nosič zasunutím tyčínok do otvorov v nosiči, zatlačte smerom k prstencu pevne proti pružinám a pokračujte, kým nebudete počuť kliknutie, čo znamená, že nosič je bezpečne pripevnený k tyčinkám. Teraz do prednej časti nosiča vložte silikónovú hadičku (zobrazené) alebo do pozdĺžnych otvorov komfortný pásik.

4. Nasadíte to!

Povoľte silikónovú hadičku (alebo popruh) a zariadenie nasuňte cez penis. Zatlačte plastový nosič smerom k sebe, kým sa pružiny nestlačia dolu. Utiahnite silikónovou trubičku (alebo popruh) za hranu vášho žalúda. Váš penis by mal byť ochabnutý, ale natiahnutý. Hadička by mala byť upevnená v zárezoch umiestnených zospodu plastového nosiča. Ak ide do zárezu ťažko uchytiť, hadičku trochu natiahnite, aby bola tenšia. Ak používate popruh, jednoducho ho utiahnite, kým nedosiahnete pevného uchytenia penisu.

5. Pridajte viac ťahu!

Uvoľnite nosič a nechajte pružiny znova roztiahnuť. Mali by ste cítiť uvoľnenie ťahu na penise. Ak tomu tak nie je, nepoužili ste spočiatku vhodné množstvo alebo vhodnú dĺžku tyčínok. Mali by ste sa vrátiť na začiatok a pridávať tyčinky tak, aby ste dosiahli väčšej dĺžky. Až budete mať vhodné tyčinky, začnite otáčať súčasne skrutky na oboch stranách dovnútra. Uvidíte, že sa skrutka po oboch stranách natáhuje a tiež natiahnutie penisu by malo byť teraz viditeľné.

6. Nájdite svoju úroveň ťahu!

Ako stále otáčate, natiahnutie je viditeľné a vy vidíte šesťhrany, ako sa zasúvajú do tyčínok (viditeľné len pri nasadenom zariadení). Čím väčšia zasunutie, tým je sila ťahu väčšia. Pokiaľ dosiahnete značky č. 3, ťah je 900 gramov, značka č. 2 je 1200 gramov a č. 1 je 1500 gramov.

7. Nejdete moc ďaleko!

Ak budete pokračovať v otáčaní skrutky moc dlho, nakoniec uvidíte, ako sa vysúva závit, čo znamená, že je nutné v otáčaní prestať. Ak ste nedosiahli dostatočného množstva ťahu (prvá značka, najprv 900 gramov) a stále vidíte závit, mali by ste pridať dlhšie predlžovacie tyčinky a skúsiť to znova.

8. Pomalý nácvik!

Postupujte prosím pomaly vo využívaní prístroja, používajte ho 1 hodinu v prvom týždni pri ťahu 900 g. Pokračujte postupným pridávaním sily a dĺžky nosenie, týmto tempom sa vyvarujete bolesti.

9. Prostriedky ochrany!

Ak vás to spočiatku bolí v mieste, kde sa trubička alebo popruh dotkne pokožky, môžete použiť ochrannú podložku ako vankúš. Sú aj iné ochranné prostriedky, ako je napríklad priľnavá gáza alebo "No slip Protech", ktoré nájdete v sekcii príslušenstvo, pokiaľ nie je dodaný s modelom vášho prístroja. Všetky tieto ochranné pomôcky by mali byť používané tak, ako je uvedené vyššie.

10. Ako ho nosiť!

Extender môžete nosiť v akomkoľvek vhodnom uhle - vyskúšajte a uvidíte, čo je pre vás najpohodnejšie.

11. Skladanie!

Pokiaľ chcete Extender zložiť, jednoducho uvoľnite trubičku (popruh) a odtiahnite / vysuňte prístroj smerom od vás.

12. Niekoľko rád pre vás!

Buďte trpezliví s užívaním aj s výsledkami, nejde o šprint, ale o maratón. Priemerné prírastky sú 10% vo vzpriamenej dĺžke (8% v obvode) po 400 hodinách používania pri 1200 gramovej sile ťahu. Väčšina mužov môže 400 hodín dosiahnuť počas dvoch mesiacov, takže by ste mali byť schopní dosiahnuť 30% Zväčšenie dĺžky za 6 mesiacov. Nová dĺžka je trvalá a prístroj už nie je nutné používať, aby ste dĺžku zachovali. Ďalšie užívanie vám poskytne ďalšie výsledky, ale prosím nejde do extrémov a zastavte používanie po primeranom zväčšení. Pozrite sa na celé podrobnej 3-D

inštruktážne video (v 6 jazykoch) na adrese www.jes-extender.com, kliknite na "How it works "a kliknite na" DVD Instructions ".

FLAGRANTI®