

# INTIMATE WELLNESS SILK'N TIGHTRA NA DOMÁCE POUŽITIE



## Návod

### OVLÁDANIE

- 1) Podržte tlačidlo napájania 3 sekundy, aby sa zaplo.
- 2) Zariadenie krátko zavibruje a rozsvieti sa zelená LED dióda.
- 3) V tomto okamihu je v režime používania v interiéri.
- 4) Krátkymi stlačeniami sa zmení intenzita až na úroveň 3.
- 5) Ďalším krátkym stlačením sa rozsvieti aj biela LED dióda a zariadenie sa prepne do režimu vonkajšieho používania.
- 6) Tu môžete tiež krátkymi stlačeniami nastaviť intenzitu až na úroveň 3.
- 7) Ak chcete zariadenie vypnúť, podržte tlačidlo na 3 sekundy, kedy bude dlho vibrovať a vypne LED diódy.

### POUŽITIE A OBMEDZENIA

Každé vnútorné a vonkajšie ošetrenie trvá 20 minút a odporúča sa používať prístroj dva až trikrát týždenne počas 4 až 5 týždňov. Potom používajte vždy podľa potreby a postupne znižujte frekvenciu používania.

**Vnútorné použitie:** Na všetky elektródy naneste malé množstvo gélu. Pohodlne si ľahnite, zapnite zariadenie a začnite s nízkou intenzitou. Vložte rameno do puzdra tak ďaleko, ako je vám to pohodlné. Z času na čas ho otočte, aby ste udržali vodivosť. Intenzitu energie môžete zvýšiť. Zariadenie nechajte na mieste 20 minút. Potom sa automaticky vypne. Ak vám vysoká intenzita spôsobuje nepríjemné pocity, zariadenie znovu spustíte a začnete znova s nižším nastavením na celých 20 minút.

**Vonkajšie použitie:** Uistite sa, že pokožka okolo vagíny je oholená, čistá a suchá. Na tri pochrómované elektródy naneste malé množstvo gélu. Pohodlne si ľahnite a na presnejšiu aplikáciu použite zrkadlo. Elektródu umiestnite na pysky a pomaly pohybujte zariadením po pokožke lineárnymi alebo krúživými pohybmi počas 20 minút.

**Upozornenie:** 2 dni po ošetrení sa vyhýbajte veľmi horúcej vode. Pri vonkajšom režime sa môže vyskytnúť začervenanie pokožky alebo mierny opuch v oblasti ošetrenia, ktoré by mali po sedení zmiznúť. Nemalo by to trvať dlhšie ako 2-5 dní. Ak začervenanie nezmizne do 5 dní, poraďte sa so svojím lekárom. Prístroj by nemali používať tehotné ženy, dojčiace ženy, transrodové ženy, deti, dospelávajúci alebo panny. Nepoužívajte s kardiostimulátormi alebo inými elektrickými implantátmi, nepoužívajte s piercingom alebo vnútro maternicovým telieskom. Taktiež nepoužívajte, ak máte ochorenie srdca, rakovinu kože v anamnéze, ochorenie pečene alebo obličiek, oslabený imunitný systém, infekciu močových ciest alebo ste v posledných 12 mesiacoch podstúpili operáciu panvy alebo iný vaginálny zákrok.

### ÚDRŽBA

Pred a po každom použití ho utrite vlhkou handričkou a potom ho osušte suchou handričkou. Potom naneste **čistič erotických pomôcok**, ktorý ho zbaví baktérií pre vašu bezpečnosť. Nepoužívajte horľavé výrobky s alkoholom.

### VODEODOLNOSŤ

Zariadenie nie je vodotesné a nie je určené na používanie v sprche alebo vo vani.

## LUBRIKÁCIA

Na použitie a zabezpečenie účinnej vodivosti elektród musíte vždy použiť Silk'n Intimate Gel, ktorý je súčasťou balenia. V prípade potreby môžete použiť aj iný **lubrikant na VODNEJ BÁZE**. Bez gélu nebude zariadenie správne fungovať. Gél nie je potrebné nanášať dovnútra, stačí ho aplikovať na elektródy.

## NABÍJANIE

O nabíjanie sa stará priložený kábel USB. Prvé nabitie trvá približne 6 hodín. Následné nabíjanie potom trvá 2 hodiny a v prevádzke trvá 30 minút.

## SKLADOVANIE

Skladujte na suchom a tmavom mieste.

## OBSAH BALENIA

Silk'n Tightra, nabíjací kábel USB, adaptér pre nabíjací kábel USB, lubrikačný gél a puzdro na Silk'n Tightra a príslušenstvo.