

3 Popis

Andropenis® je penilná dlahá, ktorá sa pripieňuje zvonka na penis. V závislosti od zamýšľaného použitia môže na penis pôsobiť ľahkou trakciou ako penilná trakčná pomôcka alebo sa môže používať bez trakcie ako penilná dlahá.

4 Komponenty

Andropenis® sa skladá z plastového podkladového krúžku, dvoch kovových tyčíniek s vnútornými pružinami a vrchného plastového držiaka so silikónovou páskou. Plastové časti sú vyrobené z POM syntetický materiál, na ktorý nepôsobia horľavé kvapaliny, napr. alkohol. Páska je zo silikónu používaného na výrobu zdravotníckych pomôcok. Kovové tyčinky pomôcky **Andropenis® gold** sú vyrobené z mosadze pokrytej vrstvou dvadsaťtyri karátového zlata. Pružiny sú z nehrdzavejúcej ocele a tyčinky z chirurgického hliníka.

SÚČIASKY (obr. 1): 1-plastový podkladový krúžok, 2-kovová os, 3-tyč so závitom, 4-nastaviteľná tyčinka so závitom, 5-kovová tyčinka, 6-skrutka, 7-pružina, 8-skrutka na zaistenie pružiny, 9-velká tyčinka 4 cm (1,6"), 10-stredná tyčinka 2 cm (0,8"), 11-malá tyčinka 0,5 cm (0,2"), 12-najmenšia tyčinka 0,3 cm (0,1"), 13-vrchný plastový držiak, 14-silikónová páska, 15-ochranný vankúšik.

POZNÁMKA: Odporúča sa handričkou zľahka votrieť kvapku oleja medzi časti 4 a 5, aby sa uľahčilo nasunutie (pozri OIL).

5 Zamýšľané použitie

- ▣ Zabráňte deformácii penisu po urologických operáciách alebo ochoreniach (použitie dlahy).
- ▣ Korekcia deformity penisu po urologických operáciách alebo ochoreniach (použitie trakčnej dlahy).
- ▣ Predĺžte dĺžku penisu pri syndróme mikropenisu a malého penisu (použitie trakcie).
- ▣ Vytvorenie alebo udržanie dostatočnej tuhosti penisu na pohlavný styk (použitie dlahy).

6 Modely

- ▣ **Andropenis Peyronie**, na prevenciu alebo korekciu deformácie penisu pri ochorení.
- ▣ **Andropenis Surgery**, na prevenciu alebo korekciu deformácie penisu po operáciách.
- ▣ **Andropenis Mini**, predĺžiť dĺžku penisu alebo pomôcť pri pohlavnom styku, pri mikropenise.
- ▣ **Andropenis Gold**, na predĺženie dĺžky penisu alebo na pomoc pri pohlavnom styku, pri citlivej pokožke.
- ▣ **Andropenis Pro**, predĺžiť dĺžku penisu alebo pomôcť pohlavný styk, v pravidelnom penisu.

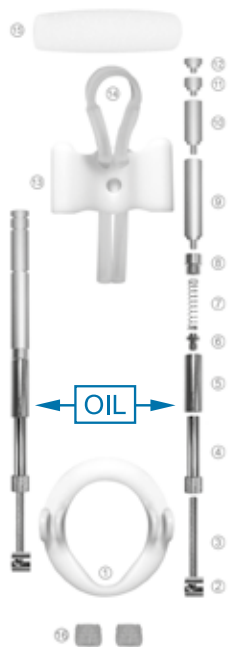





fig. 1

7 Prispôbiť

Počiatková veľkosť pomôcky **Andropenis®** je 8 cm (3,1"). Veľkosť pomôcky za meria od spodnej časti plastového krúžku ku koncu kovovej tyčinky (fig. 4, INITIAL = POČIATOČNÁ).

Prispôbte pomôcku **Andropenis®** veľkosti svojho penisu. Zmerajte si dĺžku a priemer penisu ochabnutého a potom vztýčeného penisu pomocou krajčírskeho metra (fig. 2 a 3).

Vyrábajte svoju osobnú veľkosť pomôcky **Andropenis®** tak, že od veľkosti svojho penisu pri erekcii odrátajte 4 cm (1,6").

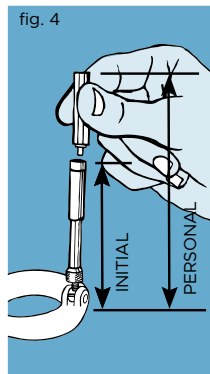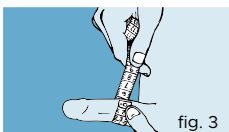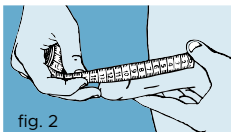

Príklad: 14,7 cm – 4 cm = 10,7 cm. > Osobná veľkosť pomôcky Andropenis® = 10,7 cm

Teraz upravte pomôcku tak, aby zodpovedala vašej osobnej veľkosti.

Najprv odpojte vrchný plastový držiak tak, že ho vysuniete smerom nahor (obr. 5), potom pridajte toľko tyčíniek, koľko je potrebné, aby ste dosiahli osobnú veľkosť pomôcky **Andropenis®** (obr. 4, PERSONAL = OSOBNÁ).

Príklad: Osobná veľkosť je 10,7 cm. = Počiatková veľkosť pomôcky **Andropenis®** (8 cm) + súčiastka č. 10 (2 cm) + súčiastka č. 11 (0,5 cm).



Ako používať

Poznámka:

Začiatkový rozmer Andropenisu Mini je 7 cm. Ak máte túto verziu, začnite adaptačné obdobie pri tom rozmere (7 cm) a zachovajte ho po dobu 15 dní: prvý deň použite zariadenie po dobu 3 hodín, ako postupne mňajú dni, zvyšujte dobu používania. Po prvých 15 dňoch zvyšte dobu používania podľa toho, ako je to indikované v tabuľkách pre používanie (pozrite dolu).



Používanie ochrannej lekárenskej vate je **POVINNÉ**, ktoré by malo byť umiestnené v drážke pod žalúdom. Nasadte jeden z modelov silikónovou páskou (kus 14), ktorý sa najlepšie hodí na ochranný vankúšik podľa veľkosti penisu (kus 15). Konce silikónovej pásky zavedte do otvoru na bočnú stranu vrchného plastového držača (súčiastka č. 13), takže z pásky vznikne slučka.

Ak je penis ochabnutý, zhrňte všetku predkožku (neobrezaní muži) na telo penisu (obr. 7) a silikónovú pásku nasadte pod korunu žalúda, kde sa stretáva s telom penisu (obr. 8).



Žalud' by nemal prísť do priameho styku s pomôckou. Následne natiahnite penis smerom od tela takže je natiahnutý v ochabnutom stave.



Uchopte podkladový krúžok (súčiastka č. 1) a najužšiu časť krúžku držte smerom nahor. Pretiahnite penis podkladovým krúžkom (súčiastka č. 1) a oprite ho do jamky vrchného plastového držača (súčiastka č. 13). Lavou rukou položte na vrchný držiak (súčiastka č. 13) a tlačte pomôcku proti svojmu telu pri súčasnom stláčaní vnútorných pružín (obr. 9).



Lavú ruku nechajte na mieste a prstami pravej ruky pretlačte žalud' slučkou vzniknutou zo silikónovej pásky (fig. 10).



Ako opraviť

Palec ľavej ruky položte na vrchol žalúda, aby penis zostal na mieste, a ťahaním za oba konce pásky pravou rukou silikónovú slučku postupne zmenšujte (fig. 11).



Pomaly ťahajte kožu na oboch stranách penisu smerom k telu, aby ste sa vyhlí stlačeniu kože alebo vytvoreniu záhybu nad žliabkom žalúda (obr. 12).

Silikónová slučka by mala byť nasadená na žliabok žalúda a v jednej línii s ním, pričom by nemala boľieť, ale mala by byť dostatočne pevná, aby sa žalúď nevysunul. Opatrne zaistíte silikónový pásik v úchytkách na spodnej strane hornej opory (obr. 13) tak, že pri každom stlačení v priehlbínach pásku natiahnete.

Utiahnite, ale neťahajte smerom nadol, aby ste zabránili stlačeniu penisu.

Dvakrát skontrolujte, či nad drážkou ani pod silikónovou páskou nie je koža, ak je, potiahnite kožu smerom k telu, aby ste zabránili jej stlačeniu. Ak chcete odstrániť **Andropenis®**, stlačte pružiny zatlačením proti telu, uvoľníte silikónový pásik (diel 14) zo spojovacích prvkov v hornej opierke (diel 13) a zväčšíte veľkosť silikónovej slučky, aby sa penis uvoľnil.

Andropenis® má systém upevnenia žalúda pomocou pásky. k dispozícii sú dva modely **Androcomfort®** band a **Androsilicone®** band. Systém Androcomfort® band umožňuje ešte pohodlnejšie používanie **Andropenis®**. Umiestňuje sa medzi žalúď a stopku penisu, do oblasti korunkovej ryhy - predlaktia. Zavedenie pásky v penovom systéme s názvom **Androtop®**. Pozrite si, ako ich používať v: www.andromedical.com/videos

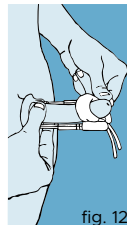



fig. 12



fig. 13




Androsupport
Sprievodca

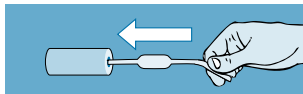

Andropenis® má silikónový krúžok, ktorý funguje ako tlmiaci systém **Androring®**. Nachádza sa medzi žalúdom a drieku penisu, coronal sulcus-prepuce. Pozrite si, ako ich používať v: www.andromedical.com/videos


Andropeyronie®, Androsurgery® a **Andropenis® Mini** majú vyššiu plastovú časť (Androsupport) prispôbenú na korekciu zakrivenia penisu (pozri "Sprievodca používaním Androsupportu"). www.andropenis.com/ifu

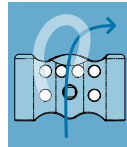

	VELKOSŤ POMÔCKY	TRVANIE DENNE
	Adaptačné obdobie	
Prvých 5 dní	Počiatočná veľkosť	3 hodiny
6. – 10. deň	Pridajte malú tyčinku 0,5 cm (súčiastka č. 11)	6 hodiny
11. – 15. deň	Pridajte malú tyčinku 0,5 cm (súčiastka č. 11)	8 hodiny
	Evolučné obdobie	
1. a 2. mesiac	Pridajte malú tyčinku 0,5 cm (súčiastka č. 11) každých 7 dní	8 hodiny
Od 3. mesiaca	Pridajte malú tyčinku 0,5 cm (súčiastka č. 11) každých 10 dní	8 hodiny
Od 5. mesiaca	Pridajte malú tyčinku 0,5 cm (súčiastka č. 11) každých 15 dní	8 hodiny

ODPORÚČAME

Odpočinok a masáž penisu a žalúdku

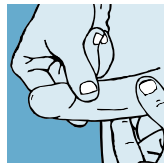



Každé 2 alebo 1,5 hodiny

Nepoužívajte ho dlhšie ako 8 hodín v pravidelných intervaloch.

Každé 2 hodiny je potrebné zariadenie na niekoľko minút vybrať, aby sa tkanivá uvoľnili.

So zariadením nespíte.

Poznámka: pre pocit väčšieho pohodlia môžete od 5. mesiaca najprv pridať tyčinku 0,3 cm (súčiastka č. 12) a po niekoľkých dňoch ju vymeniť za tyčinku 0,5 cm (súčiastka č. 11), aby bol ťah plynulejší.

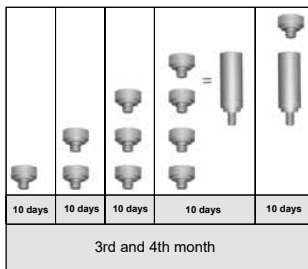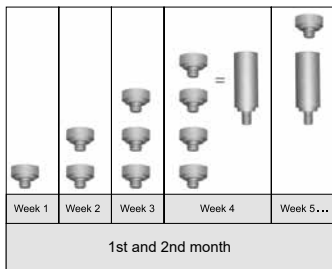



10 Spôsob použitia

Bežná liečba, s výnimkou rôznych lekárskeho predpisov, pozostáva z 2 období:

- Adaptačné obdobie v trvaní 15 dní.
- Vývojové obdobie pozostávajúce z 3 samostatných fáz: Počiatková fáza vývoja (1. a 2. mesiac), prechodná fáza vývoja (1. a 2. mesiac), fázy (3. a 4. mesiac) a konečnej fázy vývoja, ktorá sa začína v 5. mesiaci.

Prvý deň ako tréning nasadte a vyberte zariadenie 10-krát za sebou. V prípade zakrivenia sa odporúča nasadiť zariadenie smerom od zakrivenia. Príklad: Ak máte zakrivenie vpravo, mali by ste prístroj umiestniť v opačnom smere a umiestniť ho vľavo do nohavičiek. A ak máte zakrivenie smerom nadol, mali by ste spotrebič v nohavičkách umiestniť smerom nadol (pozri obrázky nižšie). Každé 2 hodiny bude potrebné prístroj na niekoľko minút vybrať, aby sa tkanivá uvoľnili. Po 5. mesiaci by sa táto doba odpočinku mala dodržiavať každých 1,5 hodiny. Toto obdobie odpočinku využite na ľahkú masáž penisu. Zariadenie umývajte každé 4 dni PH neutrálnym mydlom a vodou.

Buďte trpezliví a dôslední pri liečbe, to je kľúčom k dosiahnutiu vašich cieľov. Akákoľvek odchýlka od liečebného programu by mohla zmeniť dosiahnuté výsledky (poradte sa so svojim lekárom).

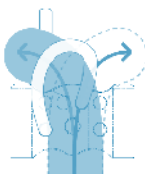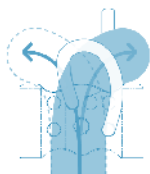

11 Operácie

Ak je operácia jednoduchá, odporúča sa začať používať **Androsurgery®** 15 dní po operácii. Ak je operácia veľmi zložitá, odporúča sa začať používať **Androsurgery®** 1 mesiac po operácii. Vždy sa poradte so svojim chirurgom, aby vám mohol poradiť, ako dlho po operácii začať používať **Androsurgery®** a dĺžku používania.

CHIRURGIA	Evolučné obdobie	
1. a 2. mesiac	Pridajte malú tyčinku 0,5 cm (súčiastka č. 11) každých 7 dní	8 hours
Od 3. mesiaca	Pridajte malú tyčinku 0,5 cm (súčiastka č. 11) každý mesiac	8 hours

12 Bezpečnostné opatrenia pri používaní

Aj keď zvyčajne nedochádza k nepríjemným pocitom, v niektorých dňoch môže byť zariadenie nepríjemné. Nemajte obavy, zariadenie používajte aj naďalej. V prípade potreby však môžete liečbu na jeden deň prerušiť.

Ak pocítite bolesť alebo nepríjemné pocity, modrasté sfarbenie alebo znečivilenie žalúda, odstráňte zariadenie a penis masirujte. Tým sa farba penisu vráti do normálu a nepríjemné pocity zmiznú. Ak pocítujete nepríjemné pocity v spodnej časti žalúda, mali by ste skúsiť nosiť bavlnu alebo gázu, aby ste túto citlivú oblasť chránili.

Ak ste nemohli nosiť pomôcku 15 až 30 dní, začnite liečbu s veľkosťou o 1 cm (0,4") menšou, ako je veľkosť pomôcky v tom čase.

Ako reziduálne riziká sú identifikované modriny penisu, kožná reakcia penisu v distálnej časti drieku a na báze penisu (miesto aplikácie plastového kružku), bolesť, dyschrómnne zmeny penisu, znečivilenie žliazok, pocit mravčenia, opuch alebo zadržiavanie tekutín v žliazokach, rana, podráždenie, zápal a nepríjemné pocity, ak sa počas používania pomôcky vyskytnú niektoré z nasledujúcich reziduálnych rizík, dôrazne odporúčame prestať ju používať.

Nepoužívajte Andropenis®: počas spánku, pri náročnej fyzickej aktivite alebo športe, pod vplyvom rekreačných drog alebo alkoholu. Ak máte vred, pohlavne prenosné ochorenie alebo ranu v oblasti pohlavných orgánov.

Počas používania zariadenia dodržiavajte prísne hygienické normy. Odstráňte pomôcku na močenie alebo vyprázdňovanie alebo počas pohlavného styku. Ak máte počas používania pomôcky erekciu, neznepokojte sa: pomôcka bude jednoducho trochu tesnejšia.

Ak sa vám na žalúdi objavujú biele škvrny, je potrebné navštíviť lekára, pretože sa u vás mohla objaviť plesňová infekcia. Osobná hygiena je veľmi dôležitá. Prístroj udržiavajte čistý

Používanie liekov na stimuláciu rastu vlasov (finasterid), liekov na liečbu depresie, liekov na spanie, liekov na upokojenie a sedatív môže výrazne znížiť účinnosť. Používanie lokálneho Minoxidilu na stimuláciu rastu vlasov je povolené.

V prípade menšieho podráždenia, pomliaždenia penisu alebo kožnej reakcie penisu v distálnej časti drieku alebo na báze penisu. Zariadenie nepoužívajte počas 4 dní. Aplikujte masť proti podráždeniu dvakrát denne, ráno a popoludní, a hojivú masť na noc. Ak rana pretrváva, prestaňte zariadenie používať a obráťte sa na svojho lekára. Ak pocítujete nepríjemné pocity v oblasti hriadeľa penisu, masirujte penis hydratačným krémom 5 minút každý večer jemnými roztahovacími pohybmi.

Kontraindikácie: Pacienti s nekontrolovanou cukrovkou, genitálnym herpesom, pohlavne prenosnými chrobákmi, uretritídou a akútnou cystitídou, akútnou prostatitídou, brušnou herniou, dermatitídou, rakovinou semenníkov, rakovinou lymfatického systému, lymfómom, paraplegií, kvadruplegií a pacienti užívajúci antikoagulačnú liečbu.

Nežiaduce účinky: Andropenis® bol navrhnutý špeciálne na lekárske použitie a jeho použitie nemá žiadne sekundárne účinky, ak sa správne používa v súlade s indikáciami, ktoré sú uvedené v tejto príručke.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Nepohodlie alebo bolesť	Prilíš tesné popruhy, nesprávne nasadenie alebo nesprávne nastavenie	- Mierne uvoľnite popruhy a opätovne skontrolujte, či sedia. Skontrolujte, či je zariadenie správne zarovnané pozdĺž hriadeľa.
		- V prípade potreby použite ďalšie polstrovanie na zníženie tlaku. - Ak bolesť pretrváva, odstráňte zariadenie a poraďte sa so svojim lekárom.
Podráždenie alebo začervenanie kože	Dlhodobé nosenie, nesprávne prispôsobenie alebo citlivosť pokožky na materiály	- Dbajte na to, aby sa zariadenie nenosilo príliš dlho bez prestávok, ako sa odporúča.
		- Na ochranu pokožky použite ochranný krém alebo ďalšie polstrovanie.
		- Zariadenie pravidelne čistite, aby ste zabránili podráždeniu od potu a nečistôt. - Ak sa podráždenie zhorší, prestaňte ho používať a poraďte sa s lekárom.
Skížnutie alebo uvoľnenie	Prilíš voľné popruhy, nesprávna aplikácia	- Opäť utiahnite popruhy a uistite sa, že poskytujú dostatočnú oporu bez toho, aby obmedzovali krvný obeh.
		- Uistite sa, že je zariadenie správne zarovnané a vycentrované na penis.
		- Skontrolujte, či nie sú opotrebované alebo poškodené popruhy alebo upevňovacie prvky. V prípade potreby ich vymeňte.
Ťažkosti s aplikáciou zariadenia	Nesprávne umiestnenie	- Pri správnom zarovnaní a aplikácii postupujte podľa pokynov.
		- V prípade potreby si pozrite demonštračné videá
Zariadenie spôsobuje opuch	Nadmerný tlak remienkov, zúženie alebo nesprávna veľkosť	- Ak sa objaví opuch, zariadenie okamžite odstráňte.
		- Zariadenie znovu nasadte voľnejšie, čím zabezpečíte správny prietok krvi.
		- Ak opuch pretrváva, pred pokračovaním v používaní sa poraďte so svojim lekárom.
Rozbitie alebo poškodenie zariadenia	Bežné opotrebovanie, nadmerná sila počas používania	- Pred každým použitím a po ňom skontrolujte, či zariadenie nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia.
		- Ak je niektorá časť poškodená alebo zničená, zariadenie vymeňte. Poškodené zariadenie sa nepokúšajte opraviť sami.
Problémy so zápachom alebo hygienou	Nedostatočné čistenie	- Po každom použití zariadenie dôkladne vyčistite jemným mydlom a teplou vodou.
		- Pred ďalším skladovaním alebo používaním zariadenie úplne vysušte.
		- Ak sa objaví pretrvávajúci zápach alebo ak čistenie problém nevyrieši, zariadenie vymeňte.
Popruhy sa stále odpájajú	Slabé alebo opotrebované upevňovacie prvky	- Skontrolujte stav popruhov a upevňovacích prvkov.
		- Ak upevňovacie prvky už nefungujú efektívne, zariadenie vymeňte, pretože nemusia poskytovať správnu oporu.



 andropenis®

www.andropenis.com

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



 andropeyronie®

www.andropeyronie.com

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



 androvacuum®

www.androvacuum.com

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



 andromedical®

andromedical.com/shop

Spare parts and accessories



 andropharma®

www.andropharma.com

PENIS

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

VIGOR

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

CURVATURE

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: www.andromedical.com

© Copyright 1995-2025 Andromedical®, Madrid (Spain).